



SARS-CoV-2 Antibody (Antikor) Testi Hızlı Uygulama Kılavuzu

- 1** Tam kan veya serum veya plazma örneği için:
1 damla (10 µL) tam kan veya serum veya plazma örneğini örnek haznesine (küçük hazne) aktararak 2-3 damla (80 µL) tampon çözeltisini tampon haznesine (büyük hazne) ekleyiniz.

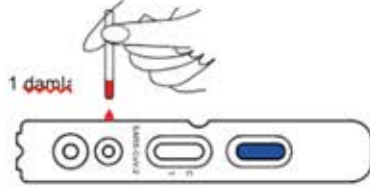

- 2** 80 µL (2-3 damla) tampon çözeltisini (büyük) tampon haznesine ekleyiniz.

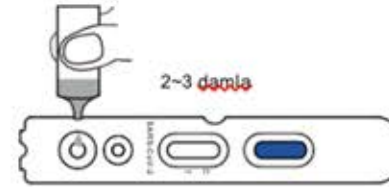

- 3** 15 dk. bekleddikten sonra sonuçları okuyunuz.
Not: 20 dakikadan sonraki sonuçlar yanlış olabileceğinden dolayı okunmamalıdır.



- 4** Sonuçların Yorumlanması

